

機械器具51 医療用嚙管及び体液誘導管
一般医療機器 輸液用延長チューブ 12170001

PEハイライン

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ・再滅菌禁止


使用方法

- ・血管造影剤等の高圧注入ラインに使用しないこと。[破損のおそれがある。]

【形状・構造及び原理等】

構造・構成ユニット

ストレート・タイプ

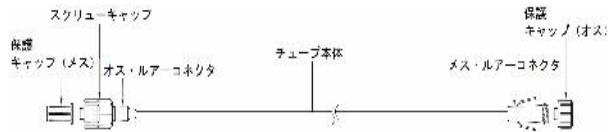

スパイラル・タイプ



【使用目的、効能又は効果】

本品は、輸液などのラインを延長するために用いるチューブである。

【品目仕様等】

チューブの引張り強さ：15Nの力で15秒間引っ張ったとき、チューブが切断したり、接合部が緩んだりしないこと。

気密性：圧力20kPaで10秒間空気を送り込んだとき、空気漏れしないこと。

【操作方法又は使用方法等】

本品は手技に精通した医師の管理下で使用すること。

1. 本品を使用する前には、包装及び本品の汚れ、破損等がないことを確認し、清潔操作で本品を滅菌袋から取り出す。
2. 本品の保護キャップを外し、プライミングを行って、チューブ内の空気を完全に追い出すこと。
3. 本品を使用する場合は、本品のメス・ルアーコネクタ側と、オス・ルアーコネクタを有する輸液セット又は延長チューブ等に確実に嵌合すること。

使用方法に関連する使用上の注意

1. 本品を輸液用延長チューブ又は輸液セット等に接続する場合は、メス・ルアーコネクタを有する製品と、本品のオス・ルアーコネクタとをロックリングに嵌合させて確実に接続すること。[それ以外のコネクタに接続すると、液漏れや外れの可能性がある。]

2. 本品を使用するラインの接続箇所に誤りがなく、確実に接続されていることを十分に確認すること。
3. 本品を、三方活栓・延長チューブ等のメス・ルアーコネクタへ接続する際は、確実にロックリングに嵌合して接続すること。[ロックが不十分な場合、外れや液漏れの可能性がある。]

【使用上の注意】

重要な基本的注意

1. 包装が破損、汚損している場合や、製品に破損等の異常が認められる場合は使用しないこと。
2. 内容物が正しく入っており、瑕疵のないことを確認すること。
3. 組み立て操作などの際に、汚染が起きないように注意すること。
4. 投与する医薬品によっては、本体に破損を生じ薬液が漏れる可能性があるため、使用する医薬品の添付文書等をよく読んで使用すること。
5. 本品を接続するラインの全ての接続箇所に緩み、外れがないことを常に確認すること。
6. 使用中は、チューブの折れによる閉塞に注意すること。
7. 本品はディスポーザブル製品であるので、1回限りの使用のみで使い捨て、再使用しないこと。
8. 包材を開封したらすぐに使用し、使用後は感染防止に留意し、安全な方法で医療用廃棄物として処分すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

貯蔵・保管方法

- ・水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。

使用の期限

- ・使用期限は外箱に記載（自己認証による）

【包装】

ストレート・タイプ

10本/箱、20本/箱、50本/箱、

コイル・タイプ

10本/箱、20本/箱、50本/箱、

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：株式会社サミック・インターナショナル

住所：東京都八王子市小宮町171-1

電話番号：042-649-2373

外国製造業者：ロムソンズ社

(ROMSONS S & S INDUSTRIES PVT. LTD.,)

外国製造所国名：インド (INDIA)