


イリゲーションセット

JMDN 70267000

届出番号13B3X10156000073

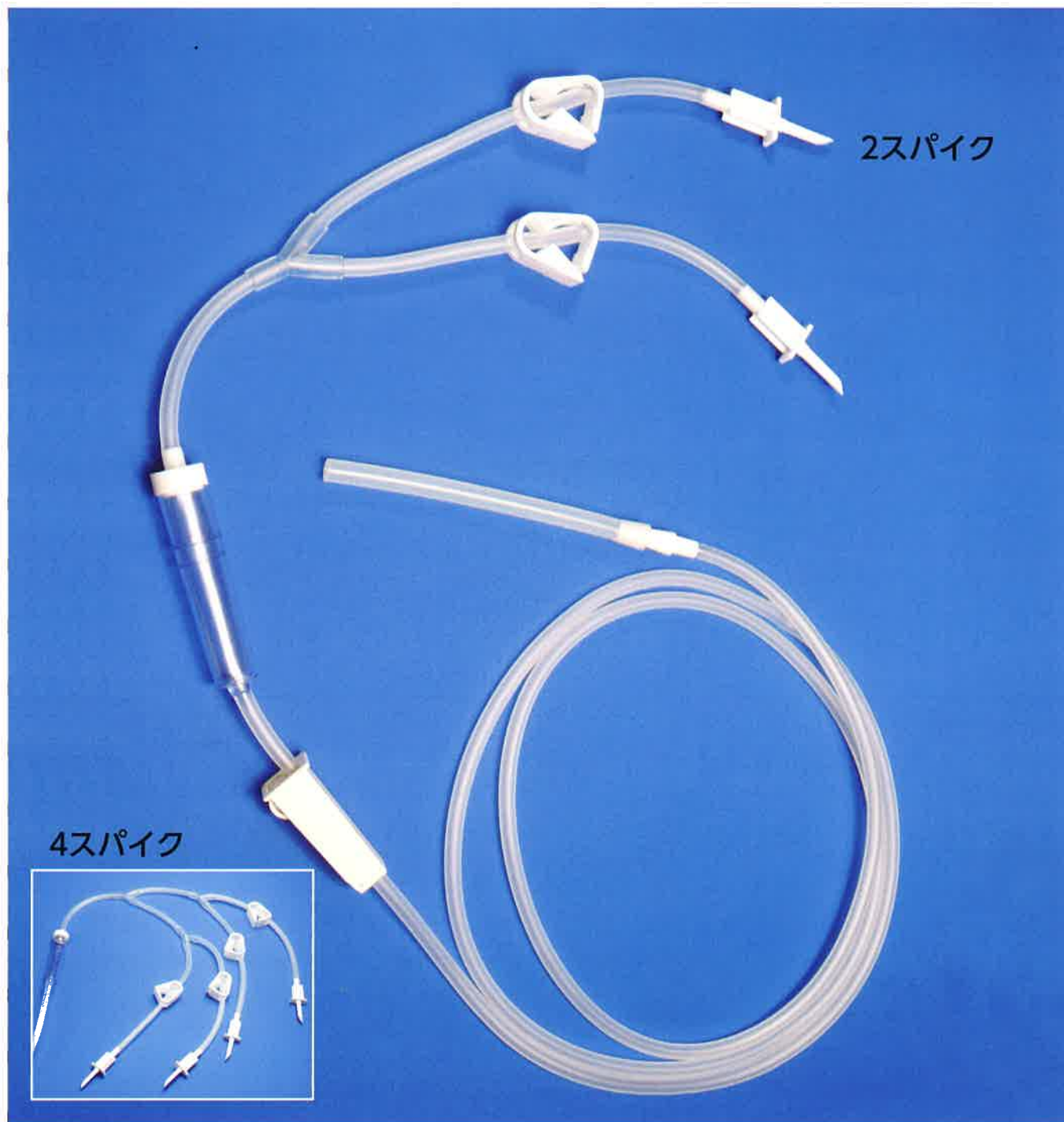

イリゲーションセット (一般医療機器 内視鏡・関節鏡用接続チューブ)

■ スパイクの形状



- ・2スパイクと4スパイクの2種類が用意されています。
- ・スパイク先端が鋭利なので、薬液バッグへの穿刺が容易です。
- ・スパイク内径が大きいので、必要な流量を確保する事が可能です。
- ・本体チューブは外径6.7mm、内径4.8mmです。

■ ハード・ドリップチャンバー



- ・硬めのドリップチャンバーは容量が大きく、流量が増加してもエアの混入を防止することが可能です。

■ シリコン製接続チューブ



- ・内視鏡との接続チューブはシリコン製なので、ラテックスアレルギーのリスクを防止することが可能です。
- ・接続チューブは外径10.0mm、内径4.8mmです。

使用上の注意

1. 組み立て操作などの際に、汚染が起きないように注意すること。
2. 本品の総ての接続箇所に緩み、外れがないことを常に確認すること。
3. 使用中は、チューブの折れによる閉塞に注意すること。
4. 本品はディスポーザブル製品であるので、1回限りの使用のみで使い捨て、再使用しないこと。
5. 包材を開封したらすぐに使用し、使用後は感染防止に留意し、安全な方法で**医療用廃棄物として処分**すること。

■ 仕様

カタログNO.	スパイク数	チューブ			商品コードJAN
		外径	内径	全長	
GS1008-260	2個	6.7mm	4.8mm	260cm	4560465112114
GS1008-285	2個	6.7mm	4.8mm	285cm	4560465112121
GS1009-260	4個	6.7mm	4.8mm	260cm	4560465112138